

Guideline



راهنمایی کاربردی طرز استفاده صحیح از تخته تعادل



این محصول از بهترین جنس چوب اوما سویس تهیه شده است و فشار وزنی ۱۰۰ Kg را تحمل می کند.



شرکت به آذین هوش آسیا

تولید کننده تجهیزات کلینیکی-توانبخشی و آموزشی

آدرس شرکت: شهرک آراین پارک علم و فناوری استان فارس ساختمان

پاسارگارد اتاق ۱۰۵

۰۷۱-۳۲۲۹۵۲۱۸-۰۹۳۵۹۴۰۱۱۲۴

WWW.HoosheAsia.com

با تشکر از خرید شما

لطفا جهت استفاده مطلوب تر از تخته تعادل و ایجاد نتایج درمانی بهتر به نکات زیر توجه فرمایید:
استفاده از تخته تعادل در ایجاد تعادل فیزیولوژیک و عصبی کودکان عادی ، کودکان دارای اختلالات یادگیری و سایر کودکان دارای رفتارهای خام حرکتی تاثیر گذار است. وجود مهارت‌های حرکتی مانند دویدن، روی یک پا ایستادن، لی لی کردن، پریدن و داشتن تعادل تاثیرات بسزایی در روند رشد عصبی کودک و به طبع آن در رشد آموزشی و اجتماعی کودک خواهد گذاشت .

۱- جهت اصطکاک بیشتر و افزایش توانمندی تعادل، کودک باید بدون جوراب و یا هر حفاظ دیگری روی تخته تعادل قرار گیرد.

(یکی از تفاوت های بارز این محصول نسبت به سایر محصولات مشابه در بازار نبود پوشش نرم بر روی صفحه تعادل است که علت آن فشار بیشتر بروی اندام حرکتی جهت ایجاد تعادل می باشد.)

۲- بعد از انجام تمرینات مکرر و ایجاد تعادل نسبی در کودک مربی در فاصله حداقل یک متری کودک قرار گیرد و توپی را به طرف دستان کودک پرتاب کند و از کودک بخواهد با کنترل تعادل خود توپ را بگیرد.

کودکان دارای دیس پراکسی یا کنش پریشی دارای مشکلاتی در مهارت‌های ظریف حرکتی (fine motor skills) می باشند که نشانه های این مشکل در نداشتن تعادل و چالاک‌های حرکتی این کودکان آشکار می باشد



توجه داشته باشید تخته تعادل حداقل به اندازه یک متر از اشیاء و وسایل محیط اطراف فاصله داشته باشد تا در صورت عدم تعادل کودک، آسیبی به کودک نرسد



All children can
Learn





شرکت به آذین هوش آسیا

تولید کننده تجهیزات کلینیکی-توانبخشی و آموزشی



شرکت به آذین هوش آسیا

تولید کننده تجهیزات کلینیکی-توانبخشی و آموزشی



شرکت به آذین هوش آسیا

تولید کننده تجهیزات کلینیکی-توانبخشی و آموزشی



شرکت به آذین هوش آسیا

تولید کننده تجهیزات کلینیکی-توانبخشی و آموزشی